


Breakthrough™ AI 18

Microcatheter

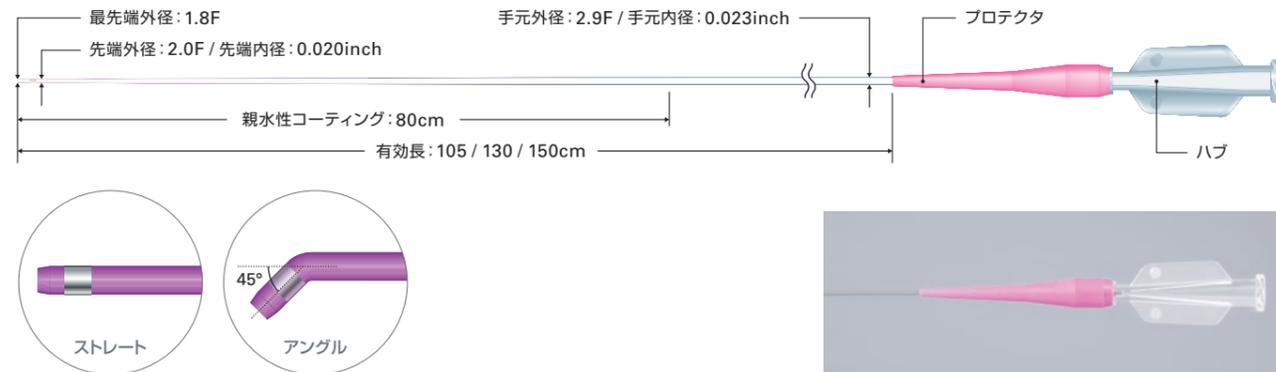

カタログ番号	品名	最先端部外径 / 内径 (F / inch)	全長 (cm)	先端形状	X線不透過マーカ数	デッドスペースボリューム
M00139450010	Breakthrough AI 18	1.8 / 0.020	105	ストレート	1	0.4mL
M00139450020	Breakthrough AI 18	1.8 / 0.020	130	ストレート	1	0.47mL
M00139450030	Breakthrough AI 18	1.8 / 0.020	150	ストレート	1	0.52mL
M00139450040	Breakthrough AI 18	1.8 / 0.020	105	アングル	1	0.4mL
M00139450050	Breakthrough AI 18	1.8 / 0.020	130	アングル	1	0.47mL
M00139450060	Breakthrough AI 18	1.8 / 0.020	150	アングル	1	0.52mL

同梱アクセサリ

ロック付1ccシリンジとシェイピングマンドレル



径表示換算目安: 1mm=3French=0.0394inches

販売名: マイクロカテーテル2
医療機器承認番号: 21700BZZ00471000
製造販売業者: 株式会社ハイレックスコーポレーション

販売名: ハイレックスシリンジ1
医療機器届出番号: 28B1X00004000016
製造販売業者: 株式会社ハイレックスコーポレーション

販売名: マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 21600BZZ00575000
製造販売業者: 川澄化学工業株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認ください。弊社営業担当へご確認ください。
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific
Advancing science for life™

販売元:
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp
製造販売元:
株式会社ハイレックスコーポレーション
兵庫県宝塚市栄町1丁目12番28号

1908-81335-B-PDF / PSST20190517-0513

Boston Scientific
Advancing science for life™

Breakthrough™ AI 18

Microcatheter

One fits All

Breakthrough™ AI 18

Microcatheter


One fits All

塞栓・血管選択・注入をカバーする

“All in One” マイクロカテーテル


最先端径1.8Fによる血管選択性と末梢到達性

手元部のプッシュビリティ、先端部の柔軟性と血管追従性をそれぞれ高めることを考えて手元部外径2.9F、先端外径2.0F、最先端外径1.8Fと段階的に外径を変化させています。

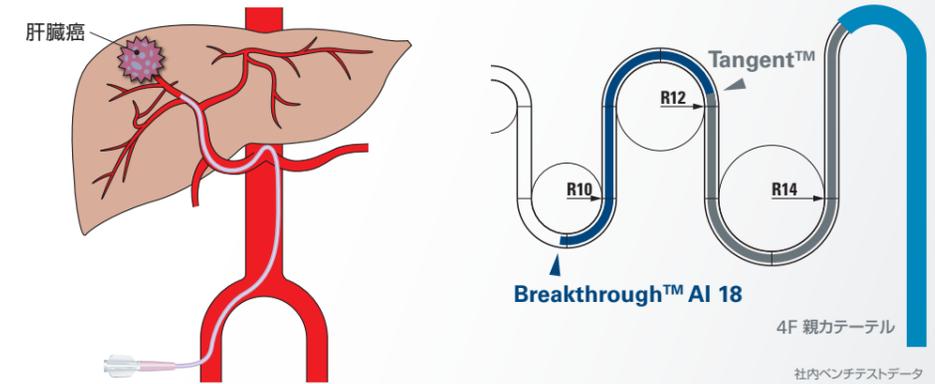

先端内腔0.020inch

先端内腔0.020inchにより
Coilや塞栓物質の
スムーズなデリバリーを期待。

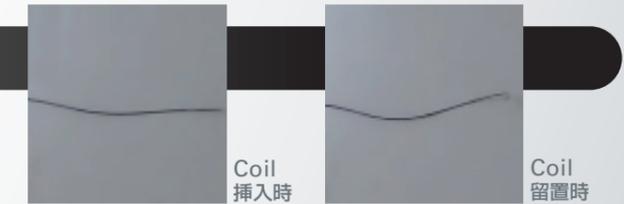


X線透視下での視認性

視認性の高いタングステンブレードを細かく編みこみ、シャフト全体の視認性が高まりました。複雑な病変へのアプローチにおいても容易な位置の把握が期待できます。

Breakthrough™ AI 18

Tangent™

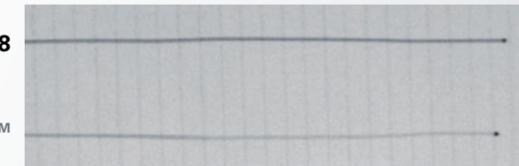

高いフロー性能

高いフロー性能を実現することを考えて先端内腔0.020inchを採用しました。

造影剤濃度 イオパミドール	有効長	フローレート (mL/sec)	注入圧		
			800psi	1000psi	1200psi
300	105	105cm, 300mg/mL	3.4	4	4.5
300	130		2.9	3.5	4
300	150		2.6	3.1	3.6
370	105	105cm, 370mg/mL	2	2.4	2.8
370	130		1.6	2.1	2.5
370	150		1.4	1.9	2.2

